


Raccord sans aiguille CLAVE*

DIRECTIVES D'UTILISATION

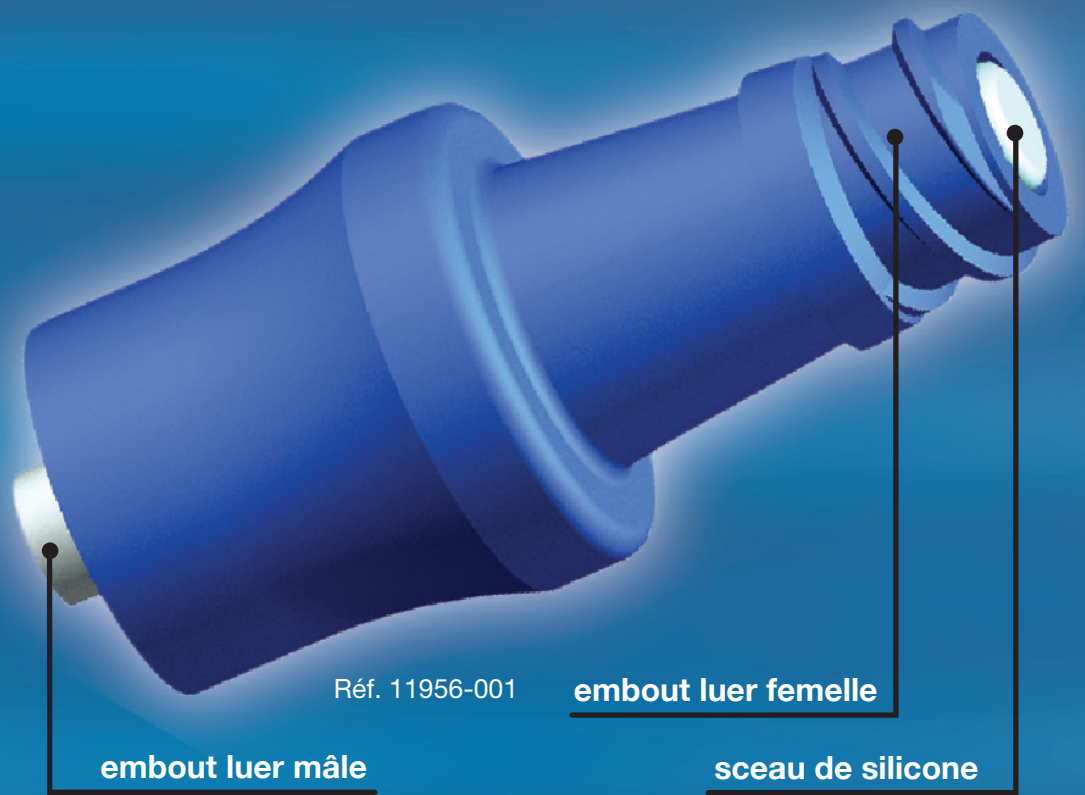

Pour un accès sans aiguille aux cathéters centraux, périphériques et artériels

1

Purge du raccord CLAVE

1. Retirer le raccord CLAVE de son emballage et fixer un perfuseur intraveineux ou une seringue servant à la purge sur l'**embout luer femelle** du raccord CLAVE.
2. Purger le raccord CLAVE selon le protocole de l'établissement en inversant le raccord CLAVE pour en chasser l'air.
3. Retirer le capuchon protecteur et fixer l'**embout luer mâle** du raccord CLAVE sur la rallonge ou le cathéter intraveineux.



2

Désinfection et utilisation du raccord CLAVE

1. Essuyer le **sceau de silicone** du raccord CLAVE à l'aide d'un tampon de désinfectant chaque fois qu'on l'utilise conformément au protocole de l'établissement.
2. Quand on utilise un dispositif intraveineux muni d'un verrou luer ou d'un anneau luer, il faut bien saisir le raccord CLAVE, enfoncer et tourner le dispositif dans le raccord CLAVE jusqu'à ce que le branchement soit solide. Pour débrancher le dispositif, tenir solidement le raccord CLAVE et le tourner jusqu'à ce qu'il soit desserré.

NOTA : Quand on utilise un dispositif à verrouillage total, on doit d'abord enfoncer l'embout mâle dans le seau de silicone et le tourner 1/4 de tour pour assurer un branchement solide, puis bloquer ensuite le collier. On obtient ainsi un raccordement stable et un débit optimal.

3. Le raccord CLAVE constitue une barrière pour les bactéries.
Ne pas utiliser les capuchons.

Caractéristiques du raccord CLAVE :

- Élimine entièrement le besoin de recourir à des aiguilles pour l'intraveinothérapie
- Débit moyen = 185 cc/min à une hauteur de 91 cm (36 po)
- Contre-pression = 60 psi
- Compatible avec le sang, les antinéoplastiques et les lipides
- Volume résiduel (espace mort) = 0,06 cc
- Ne renferme pas de latex naturel

3

Rinçage du raccord CLAVE

1. Rincer le raccord CLAVE après chaque usage, conformément au protocole de l'établissement.

PRÉCAUTION : Il est recommandé de changer ce dispositif selon le protocole de l'établissement.

